

滅菌済

RACCOON

# ステリ・バッグ

IVH・混注・輸液・各製剤の**病棟払い出し**／**在宅医療用に最適!**



- 真空パック可能な袋です。従来品より強度があり、**開封するまで真空を保持**します。(誤開封・汚染防止)
- 酸素透過率、水蒸気透過率が低く、紫外線(UV)遮光により、**薬液の品質劣化を防ぎます**。(品質安定)
- 10枚単位を真空パックし、更に**滅菌(ガンマー線)済み**で、クリーンルーム・クリーンベンチ内でそのまま使用できます。(汚染防止)
- 使用時はフック取り出し口を開封し、フックを吊り下げることによりそのまま**紫外線(UV)遮光・防塵の点滴カバー**となります。(1パックで2役)
- 開封は**簡単なノッチ付き**で、直線的に切ることができます(簡単)
- 卓上型・手動脱気シーラー(V-301)も用意しております。(即納)

## 【仕様】

型式	寸法(mm)	包装単位
SB-38	380×240	10枚／ 1パック×50 =500枚／箱
SB-48	480×300	
SB-50	500×340	
ローコスト版 SB-48NB*	480×300	

\*紫外線透過率は若干大きくなります。

**使用方法**

- ① ノッチ部を手で引き裂いて開封する。  
上下両サイド(計4カ所)に引き裂きやすいようにノッチ加工をしております。
- ② 頭の部分が出たら、フックにかけます。  
フックが出ないときは縦破線をカットして取り出してください。
- ③ 破線にそってカットする。
- ④ ノズルを取り出して完了です。  
下側破線をカットしノズルを取り出し使用する

フック側横破線をカットする

フックを取り出しスタンドにかける

製造販売元

**M 三田理化工業株式会社**

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2 TEL: 06-6458-0971 FAX: 06-6458-2393  
 東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102 TEL: 03-3812-5371 FAX: 03-3812-5041

<http://www.racoon.co.jp>



FM87147 / ISO 9001

## 卓上型・手動脱気シーラー V-301

簡単操作・強力吸引・しっかり密封。



- 排出速度18L/minの高速脱気タイプ。
- シール幅を10mmと5mmに切り替え可能。
- ステリ・バッグの真空シールに最適で、ステリパウチ、パウチャーのシールも可能です。



電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	シール幅 5mm : 560W 10mm : 1050W
吸気性能	-69kPa
接着部温度	最大230℃以上
本体サイズ	400mm×420mm×228mm
重量	12.3kg
シール可能	300mm以下 (SB-50は2回シールが必要です。)
シールヒーター	下側加熱 5mm幅、10mm幅
機能	吸気シール/シールのみ

製造販売元

 **三田理化工業株式会社**

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2 TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393  
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102 TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

<http://www.racoon.co.jp>



FM87147 / ISO 9001